

Curacid® Medical – alkoholfreie Schnelldesinfektion

Curacid® Medical ist eine alkoholfreie Schnelldesinfektion für Gegenstände und Flächen in medizinischen und hygienisch kritischen Bereichen. Es ist schnell wirksam, hat eine sehr gute Reinigungsleistung und schont dabei sensible Oberflächen wie z.B. Acrylglas oder Polycarbonatglas. **Curacid Medical** wirkt reinigend und fettlösend und ist daher auch sehr gut für Solarien geeignet.

Curacid® Medical ist gebrauchsfertig, benetzt gleichmäßig, bildet keine sichtbaren Rückstände und ist angenehm im Geruch. Die gute Materialverträglichkeit gestattet eine universelle Anwendung. Mit breiter mikrobiologischer Wirksamkeit in praxisgerechten Einwirkzeiten.

Eigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA)
- fungizid
- virusinaktivierend inkl. HIV/HBV, Rotavirus
- alkoholfrei, nicht brennbar

Wirksame Bestandteile in 100 g Konzentrat:

10,0 g quaternäre Ammoniumverbindung

Chemisch-physikal. Daten (bei 20°C)

Aussehen	klare, farblose Flüssigkeit
Dichte	0,95
pH-Wert Konzentrat	ca. 6,4
pH-Wert gebrauchsf.	ca. 7

Einsatzgebiete

Zur Flächendesinfektion in allen medizinischen und industriellen Bereichen. Ärztlichen Praxen, Gesundheitsämtern, Schulen, Kindergärten sowie sanitären und werksärztlichen Bereichen in Industriebetrieben. Zur Flächendesinfektion von Wänden und Inventar im OP, von Betten, Matratzen, Bettgestellen, Decken und Kissen.

Für Kranken- und Transportfahrzeuge, Notarztwagen, Flugzeugkabinen, Förderbänder, Transportkörbe und Geräte.

Ebenso für Untersuchungs- und Transportliegen, Ablagen, Labortische, medizinische Geräte. Für Bekleidung wie Kittel, OP-Schuhe, Strümpfe, Gummischürzen, etc.

Auch hervorragend geeignet zum Tränken von Vliesrollen.

Anwendungsempfehlungen

Flächen und Gegenstände gleichmäßig bis zur vollen Benetzung aus ca. 30 cm Entfernung einsprühen. 1 Minute einwirken lassen und ggf. mit einem Tuch abwischen.

Gemäß VAH-Richtlinie mit verkürzter Einwirkzeit (1 Minute) geprüft.

Das gebrauchsfertige Curacid Medical (Artikel 13050 bzw. 13051) entspricht einer 7,5%igen Lösung mit 60 Sekunden Einwirkzeit.

Einwirkzeiten für Medical Konzentrat

7,5%ige Lösung	1 Min. Einwirkzeit
5,0%ige Lösung	5 Min. Einwirkzeit
2,0%ige Lösung	15 Min. Einwirkzeit
1,0%ige Lösung	1 Std. Einwirkzeit
0,75%ige Lösung	4 Std. Einwirkzeit

Bei MRSA 1 Minute Einwirkzeit

DGHM/VAH-zertifiziert

Gutachten

Prof. Dr. Dr. E. Marth, Graz
Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt
Prof. Dr. G. Frösner, München (HIV/HBV)
Prof. Dr. J. Steinmann, Bremen (Rotaviren)
Fa. Röhm, Darmstadt (Verträglichkeit auf Kunststoff)

Lieferformen

Art.-Nr.: 13050 1000 ml Flasche

Art.-Nr.: 13051 5 Liter Kanister

Art.-Nr.: 13052 5 Liter Kanister Konzentrat